


# AQUA PEEL 2.0



Peeling

+

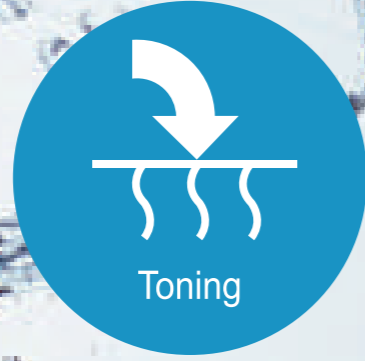

Toning

=

Skin  
Rejuvenation

KOCYİĞİT  
MEDİKAL ESTETİK


## AQUA PEEL 2.0




## AQUA PEEL 2.0

Derinlemesine Cilt Bakımı

Başlık	Büyük - Küçük
Vakum Basıncı	0~670 mmHg
Kontrol paneli	Sabit voltaj kontrol paneli
Soğutma Sistemi	Hava soğutma sistemi
Giriş Gücü	AC220-240VAC, 50/60Hz
Güç	200W
Ölçüler	W280 x D320 x H900(mm)
Ağırlık	25Kg

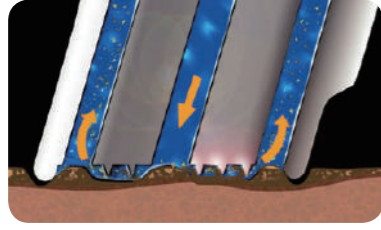

Peeling ve Ekstraksiyon

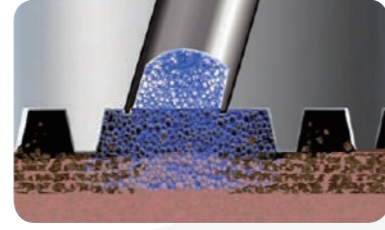

Dolgu

AquaPeel 2.0 eş zamanlı olarak vorteks emisyonlu başlığın merkezi yuvası aracılığıyla solüsyon dolgusuyla cildi yumuşatır, soyar, cilt özünü çıkarır. Hidratlar ve vakum kullanarak ikili emiş yuvasıyla atığı boşaltır.



Küçük

Büyük

## İşlemler

### ADIM

#### 01 Temizleme & Peeling

AquaAHA; içeriğinde düşük oranda AHA (Solüsyon) ile Aquapeel cildin ihtiyacına göre 5-10 dk uygulanır. Ölü dokuların temizlenmesi ve gözeneklerin açılmasını sağlar.

### ADIM

#### 02 Ekstraksiyon

AquaSA; içeriğinde düşük oranda bulunan SA (Solüsyon) ile Aquapeel cildin ihtiyacına göre 5-10dk uygulanır. Cildin alt katmanlarına kadar salisilik asitin emilmesini sağlar. Bakteri ve parazitlerden cildin temizlenmesini sağlar.

### ADIM

#### 03 Hidrasyon & Beslenme

AquaMS; içeriğinde yatıştırıcı ve nemlendirici aktif maddelerin bulunduğu solüsyon ile Aquapeel, cildin yatışmasını ve bol nem almasını sağlar.

Bu aşamalardan sonra mükemmel bir şekilde temizlenmiş ve arındırılmış bir ciltle, uygun görülen ürünlerle gönül rahatlığı ile cilt bakımına devam edilir.


# AQUA PEEL 2.0

## Cilt Bakımını Yeniden Tanımlar!


3 farklı medikal solüsyon ile cildin ihtiyaç duyduğu vitaminlerin, cilde emilimi ve peeling işlemini ağrısız, acısız kısa sürede uygulamasını sağlar. Tıkanık gözeneklerin temizlenmesini ve daha genç görünümünü sağlar.

3 farklı solüsyon ile medikal bakım  
Güçlü ve kararlı vakum  
Dokunmatik kontrol paneli sayesinde kolay kullanım

### Fonksiyonlar

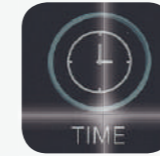


Zamanlayıcı

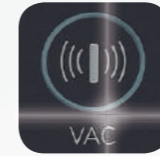

Vakum Seviyesi Ayarlama



Doğru solüsyon miktarını ayarlama

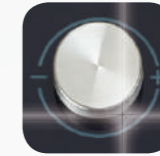

Tuş Kontrol Sistemi

### AQUA PEEL 2.0 Solutions



Tüm cilt tipleri için ölü cilt aynı anda yumuşar ve soyulur, laktik asit aşılır

AHA solution S1



BHA solution S2 yağlı & akne eğilimli ciltler için Salisilik asit ile ciltteki siyah noktaların temizlenmesine yardımcı olur

BHA solution S2



Nemlendirme & Besleme Cildi nemlendirir & besler

Essence solution S3

